



## Invacare® **Sonnet Basic**

---



*Bruksanvisning S*

*Invacare EC-Høng AIS  
Ident. no.: 1427681  
Version 02 09.2002*



# Bruksanvisning för Invacare® Sonnet Basic

Detta sängbord är utvecklat för vård och omsorg och innehåller en hel del egenskaper och funktioner som är speciellt utvecklade för just denna brukarmiljö.

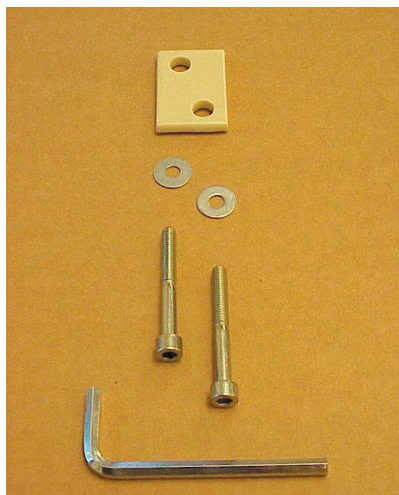


Fig. 1

Montering av teleskopben på U-ramen:

De 2 skruvarna med brickor förs igenom beslaget och U-ramen - och skruvas fast i teleskopbenets underdel. Skruva fast skruvarna med det tillhörande insex nyckeln. Se fig. 1 och fig. 2.

Skruva i fingerskruven löst.

De fyra hjulen monteras på U-ramen med en skiftnyckel eller fast nyckel.

Ställ underdelen på hjulen.



Fig. 2

Bordsskivan kan nu monteras på underdelen.

Överdelen av teleskopbenet förs ner i underdelen. Skruva fast fingerskruven när bordsskivan är i önskad höjd. Se fig. 3.



Fig. 3

Handtaget under bordsskivan trycks upp så pass mycket att justeringsskivan frigörs. Vrid bordsskivan 180°.

När handtaget släpps justeras bordsskivan fram till dess att spärrhaken kommer i indgreb. Se fig. 3.

# Bruksanvisning för Invacare® Sonnet Basic

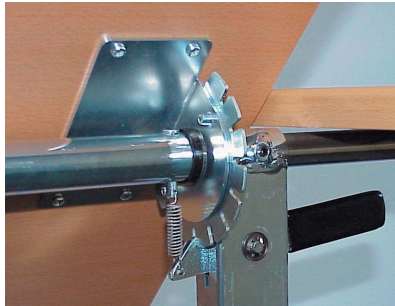


Fig. 4

Röret på sidobordet förs in i röret över handtaget. Sidobordet sjuts in helt och vrids till planläge. Lås sidobordet med skruven.

Bordsskivan vrids tillbaka till önskad ställning. Se fig. 4, fig. 5 och fig.6.



Fig. 5

Rengör bordet med rengöringsmedel och fuktig trasa.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller lösningsmedel.

Bordet tål inte rengöring med högtrycksspruta.

Inget av bordets rörliga delar behöver smörjas.  
De skall dock vara rena för att fungera tillfredsställande.

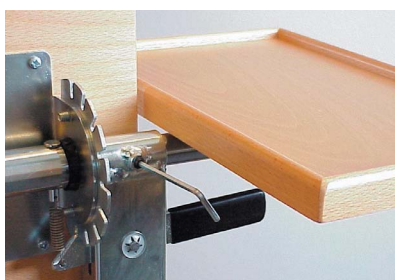


Fig. 6

Sängbordet skall användas i rum med en fuktighetsgrad som motsvarar inomhusmiljö.

Det skall vara frostfritt.



## Customer Sales and Service

---

### **INVACARE A/S**

Sdr. Ringvej 39  
DK-2605 Brøndby  
Phone: +45 36 90 00 00  
Fax: +45 36 90 00 01

### **INVACARE AB**

Fagerstagatan 9 / Box 66  
S-163 91 Spånga  
Phone: +46 8 761 70 90  
Fax: +46 8 761 81 08

### **INVACARE Deutschland GmbH**

Dehmer Strasse 66  
D-32549 Bad Oeynhausen  
Phone: +49 57 31 754 0  
Fax: +49 57 31 754 150

### **INVACARE B.V.**

Celsiusstraat 46  
NL-6716 BZ Ede  
Phone: +31 318 69 5 757  
Fax: +31 318 69 5 758

### **INVACARE AS**

Grensesvingen 9  
P.O. Box 6230 / Etterstad  
N-0603 Oslo  
Phone: +47 22 57 95 00  
Fax: +47 22 57 95 01

### **INVACARE LTD**

South Road  
Bridgend Industrial Estate  
UK-Bridgend, CF31 3PY  
Phone: +44 1 656 664 321  
Fax: +44 1 656 667 532

### **INVACARE N.V.**

Autobaan 14  
B-8210 Loppem, Brügge  
Phone: +32 50 83 10 10  
Fax: +32 50 83 10 11

### **INVACARE Poirier S.A.**

Les Roches  
F-37230 Fondettes  
Phone: +33 2 47 62 64 66  
Fax: +33 2 47 42 12 24

Production Company:

### **INVACARE EC-Høng A/S**

Østergade 3  
DK-4270 Høng  
Phone: +45 58 85 27 22  
Fax: +45 58 85 43 86  
[www.invacare.com](http://www.invacare.com)

